

De Summit positioneringsproducten zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en typen.

Kijk op onze website voor ons complete assortiment.



made in Deventer

De volledige productie van de positioneringsproducten vindt plaats bij Summit in Deventer. Zo houden we optimaal grip op elk product voordat het de deur uit gaat. Daarnaast zijn wij hierdoor in staat om zelf een gezonde en aangename werkomgeving te creëren.



flexibiliteit & maatwerk

Door onze werkwijze zijn wij in staat om snel en adequaat te reageren op de vraag van onze klant. Ook spoedleveringen zijn hierdoor geen probleem. Daarnaast kunnen wij ook altijd maatwerk leveren. Dit kan zelfs al binnen 5 werkdagen bij u geleverd worden.



snelle leveringen

Alle Summit producten worden rechtstreeks vanaf het magazijn in Deventer geleverd. Wij hebben vrijwel alle producten op voorraad waardoor de producten meestal de volgende dag al in huis zijn.



meer dan 25 jaar expertise

Met een jarenlange ervaring op het gebied van zitten en positioneren heeft Summit de juiste expertise in huis om een goed passend product te leveren dat aansluit bij de behoeften van de gebruiker. Daarnaast kunnen onze klanten, indien gewenst, natuurlijk altijd gebruik maken van onze expertise.



persoonlijke service

Of het voor, tijdens of na de aankoop is, bij Summit kunt u altijd rekenen op onze persoonlijke service en nazorg. Wij geven indien gewenst advies, maar ook als een product niet goed bevalt zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar om een goede oplossing te kunnen bieden.

Handleiding positioneringsproducten



producthandleiding positioneringsproducten



Deze handleiding ontvangt u bij uw nieuwe Summit positioneringsproducten en is bedoeld voor u als gebruiker en/of uw verzorgende. Lees voor een optimaal en veilig gebruik van het product deze handleiding aandachtig door en volg de adviezen op.

gebruik

De flexibele positioneringsproducten van Summit Revalidatietechniek zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met weinig tot geen rompstabiliteit, een lage spierspanning en epilepsie. De elasticiteit van het materiaal laat bewegingen enigszins toe, maar geeft tegelijkertijd een functionele steun aan het lichaam. De mate van bewegingsvrijheid kan gevarieerd worden door het strakker of losser spannen van de nylon banden. De positioneringsproducten zijn gemaakt van een ventilerende stof aan de achterzijde, een elastische neopreen kern en een brandwerende stof aan de voorzijde. Door de professionele afwerking, de nylon banden en onzichtbare sluitingen is het product zeer gebruiksvriendelijk. Summit biedt hiermee een passend positioneringsproduct dat voldoet aan alle eisen van functie, draagcomfort en uiterlijk. De duurzaamheid van de materialen garanderen een lange levensduur.

veiligheid



LET OP

Dit product is niet geschikt als veiligheidsgordel bij transport in voertuigen. Met het oog op het voorkomen van verwondingen, wordt geadviseerd het product niet bloot te stellen aan extreme temperaturen.

reiniging

Het is aan te raden het positioneringsproduct wekelijks af te nemen met een vochtige doek. Wanneer het product nat is, dient u het goed te laten drogen. Bij het wassen van het product dienen de volgende wasvoorschriften in acht genomen te worden:



wetgeving

Buiten de artikelen die individueel op maat vervaardigd worden, voldoen alle positioneringsproducten van Summit Revalidatietechniek aan de verordening (EU) 2017/745 en zijn de producten CE gemarkeerd.



LET OP

Naar aanleiding van de Europese regelgeving en de Wet op de Medische Hulpmiddelen (93/42/EWG), adviseren wij dringend om het flexibele borstpositioneringsvest te gebruiken in combinatie met een heuppositioneringsgordel.

montage



LET OP

Montage en instellingen mogen alleen gedaan worden door daartoe bevoegd persoon. Gebruik dit product alleen op verwijzing van een bevoegd en bekwaam persoon.

- 1 Controleer of het juiste product is geleverd.
- 2 Bepaal de positie voor de klepsluitingen op iedere zijkant. Bepaal daarna de positie voor de klepsluitingen aan de achterzijde van de stoel. Deze kunnen doormiddel van de meegeleverde popnagels gemonteerd worden op het Summit basisframe van de zitvoorziening. Ook kunnen deze vastgeschroefd worden op de bevestigingspunten van de rolstoel. Let op: niet alle stoelen hebben bevestigingspunten, gebruik indien nodig buisbevestigingen waarop de klepsluitingen bevestigd kunnen worden. Montage dient te geschieden door daarvoor bevoegd persoon. Bevestig de klepsluitingen met het juiste gereedschap en bevestigingsmateriaal.
- 3 Voer de nylon banden door de klepsluitingen en stel deze op de juiste manier af (zie richtlijnen voor het afstellen). Het positioneringsproduct mag de persoon niet naar beneden trekken en vermijd oncomfortabele druk.
- 4 Gebruik bandhouders om de bandeindes op te bergen. Zorg dat de nylon banden buiten bereik blijven van bewegende en draaiende delen van de rolstoel.
- 5 Controleer regelmatig het product op slijtage. Controleer dagelijks de bevestiging en de spanning op de nylon banden.

richtlijnen voor het afstellen

Borst positionering

De neopreen schouderdelen van de borstpositionering moeten tot over de schouders vallen en horizontaal naar achter lopen, zodat de nylon banden en sluitingen niet op de schouders rusten. Het midden van de borstpositionering moet samenvallen met het onderste deel van het borstbeen (sternum).

Door middel van de klepsluitingen kunnen de nylon banden eenvoudig worden afgesteld.

Heup positionering

Door middel van de klepsluitingen worden de heupgordels bevestigd op het basisframe van de zitvoorziening. De lengte kan hiermee eenvoudig worden afgesteld. De gordel dient onder een hoek van +/- 60 graden schuin naar achteren te worden geleid.

zitbroeken

Controleer of het zitgedeelte van de zitvoorziening een doorvoer heeft naar de achterkant van de rolstoel. Indien van toepassing, leidt de onderste banden door de doorvoer en monteert deze met de meegeleverde klepsluiting direct achter de doorvoer. De neopreen heupbanden dienen tot over de bekkenkam te worden geleid. Zorg ervoor dat er geen ruimte ontstaat tussen de heupen en de zitvoorziening, dit voorkomt onderuitzakken van de belanghebbende. Let op dat de sluiting niet drukt op het lichaam.

