

*De Summit hoofdsteunen zijn verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen en typen.*

Kijk op onze website voor ons complete assortiment.



made in Deventer

De volledige productie en/of assemblage van de hoofdsteunen vindt plaats bij Summit in Deventer. Zo houden we optimaal grip op elk product voordat het de deur uit gaat. Daarnaast zijn wij hierdoor in staat om zelf een gezonde en aangename werkomgeving te creëren.



flexibiliteit & maatwerk

Door onze werkwijze zijn wij in staat om snel en adequaat te reageren op de vraag van onze klant. Ook spoedleveringen zijn hierdoor geen probleem. Daarnaast kunnen wij ook altijd maatwerk leveren. Dit kan zelfs al binnen 5 werkdagen bij u geleverd worden.



snelle leveringen

Alle Summit producten worden rechtstreeks vanaf het magazijn in Deventer geleverd. Wij hebben vrijwel alle producten op voorraad waardoor de producten meestal de volgende dag al in huis zijn.



meer dan 25 jaar expertise

Met een jarenlange ervaring op het gebied van zitten en positioneren heeft Summit de juiste expertise in huis om een goed passend product te leveren dat aansluit bij de behoeften van de gebruiker. Daarnaast kunnen onze klanten, indien gewenst, natuurlijk altijd gebruik maken van onze expertise.



persoonlijke service

Of het nou voor, tijdens of na de aankoop is, bij Summit kunt u altijd rekenen op onze persoonlijke service en nazorg. Wij geven indien gewenst advies, maar ook als een product niet goed bevalt zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar om de een goede oplossing te kunnen bieden.



Handleiding Hoofdsteunen

handleiding hoofdsteunen

Lees om gevaren en ongelukken te voorkomen deze handleiding aandachtig door en volg de adviezen op.

toepassingen

De hoofdsteunen van Summit zijn ontwikkeld voor zowel algemeen gebruik als voor specifiekere ondersteuning van het hoofd.

specificaties

De combi, laterale en vario hoofdsteunen zijn vervaardigd uit een zwart poly-urethaan schuimvormdeel met een vormbare metaalkern. Deze hoofdsteun is met een instelbaar kogelscharnier gemonteerd aan de fixatiestang, die recht of gebogen verkrijgbaar is. De fixatiestanghouder is gemaakt met een klemhuis waardoor deze traploos in hoogte verstelbaar is.

De modelleerbare laterale hoofdsteunen zijn vervaardigd uit een polyetherschuim met een vormbare metaalkern.




Combi hoofdsteun



Laterale hoofdsteun




Vario hoofdsteun

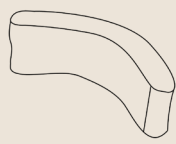

Modelleerbare laterale hoofdsteun

Naast de verschillende type hoofdsteunen zijn er ook verschillende combinaties met bevestigingsstangen.

- Hoofdsteun fixatiestang, Recht
- Hoofdsteun fixatiestang, Gebogen
- Hoofdsteun fixatiestang, Wegklapbaar
- Hoofdsteun kogelstang, Recht
- Hoofdsteun kogelstang, Gebogen
- Hoofdsteun kogelstang, Wegklapbaar

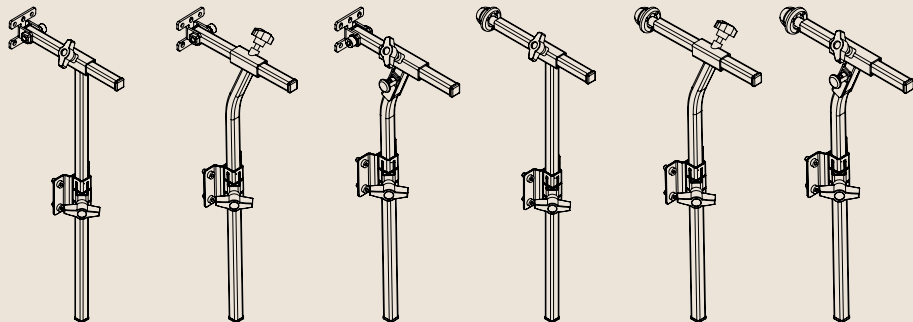


instellen van de hoofdsteun i.c.m. een fixatiestang

Het instellen van de hoofdsteun gebeurt door middel van een fixatiestang. Door de fixatiestang kan de hoofdsteun in de horizontale of verticale richting geroteerd worden. Dit is afhankelijk van de richting van het scharnier (C). Dit is eenvoudig te veranderen door het dwarsbuisje 90° te roteren.

Hoofdsteun instellen d.m.v. een fixatiestang:

- Draai vleugelknop A los en stel de juiste hoogte in, draai vervolgens vleugelknop weer vast.
- Draai vleugelknop B los en stel de juiste diepte van de hoofdsteun in, draai vervolgens de vleugelknop weer vast.
- Draai bout C voorzichtig los en roteer de hoofdsteun, draai vervolgens de bout weer vast.

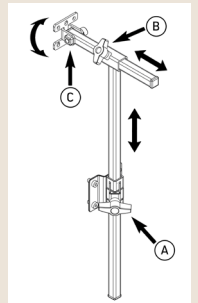


instellen van de hoofdsteun i.c.m. een kogelstang

Het instellen de hoofdsteun door middel van een kogelstang is bijna identiek aan het instellen van de fixatiestang. Door middel van de kogelstang kan de hoofdsteun in zowel de horizontale als verticale richting geroteerd worden.


Hoofdsteun instellen d.m.v. een kogelstang:

- Draai vleugelknop A los en stel de juiste hoogte in, draai vervolgens vleugelknop weer vast.
- Draai vleugelknop B los en stel de juiste diepte van de hoofdsteun in, draai vervolgens de vleugelknop weer vast.
- Draai 2 van de 3 boutjes bij C voorzichtig los en roteer de hoofdsteun, draai vervolgens de boutjes weer vast.

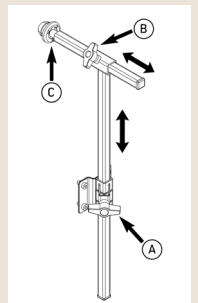

wegklapbare bevestigingsstang

Het instellen de hoofdsteun gebeurt op dezelfde manier als bij de bovenstaande bevestigingsstangen. Met deze stang is de hoofdsteun naar boven weg te klappen, wat het maken van transfers makkelijker maakt. Ontgrendel de stang door knop A uit te trekken en vergrendel de stang weer door knop A los te laten.

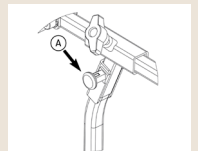

onderhoud

De combi, laterale en vario hoofdsteunen kunnen met een vochtige doek worden afgenomen. Ook de hoofdsteunhoezen van de modelleerbare laterale hoofdsteunen kunnen met een vochtige doek worden afgenomen.